

## Cuidado diario de su prótesis de voz

### Provox® Brush (Cepillo)





Para ayudar a mejorar el rendimiento y prolongar la duración del dispositivo, limpie la prótesis de voz por la mañana, por la tarde y después de cada comida usando el Provox Brush y el Provox Flush.

1. Humedezca las cerdas del Provox Brush con agua potable y luego insértelo hasta el fondo de la prótesis de voz. Quite el cepillo suavemente si siente alguna resistencia.
2. Mueva el cepillo suavemente hacia adelante y hacia atrás mientras lo rota al mismo tiempo; esto limpiará toda la prótesis. Continúe así hasta que el cepillo salga limpio y no tenga nada de restos de su prótesis.
3. Cuando termine:
  - Limpie el cepillo con agua potable y detergente.
  - Enjuáguelo con agua potable y deje que se seque con el aire antes de guardarlo.
4. Reemplace el cepillo una vez al mes o antes si las cerdas lucen desgastadas o descoloridas.

**Consejo:** Si lo necesita, el mango azul del cepillo se puede doblar para acceder mejor a la prótesis de voz. No doble la punta de alambre del cepillo. No rote el cepillo durante la limpieza cuando el mango esté doblado.

**Consejo:** Si su prótesis es de 12.5 mm o más larga, use un Provox Brush XL. Si su prótesis es de 10 mm o más corta, use un Provox Brush normal.

5. Desinfecte el Provox Brush según las instrucciones de uso.

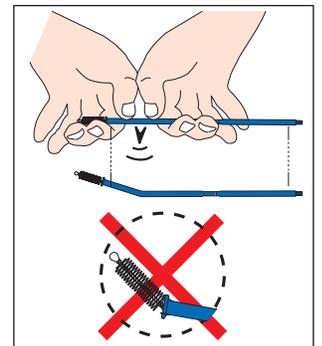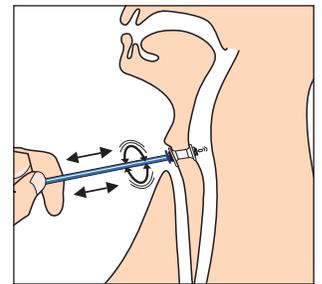

## Cuidado diario de su prótesis de voz Provox® Flush (enjuague)



Para ayudar a mejorar el rendimiento y prolongar la duración del dispositivo, limpie la prótesis de voz por la mañana, por la tarde y después de cada comida usando el Provox Brush y el Provox Flush.

1. Use el Provox Flush con agua potable o aire. No lo use con ningún otro líquido que no sea agua.

**Consejo:** Si quiere usar el irrigador con agua, practique con aire primero. Siga con agua cuando se sienta seguro.

**Advertencia:** Evite la entrada de agua en la tráquea.

2. Coloque el extremo puntiagudo del irrigador en un vaso con agua potable. Apriete y suelte la pera de silicona transparente para rellenar la pera de succión con agua.
3. Inserte el extremo puntiagudo del Provox Flush por completo en la prótesis de voz asegurándose de que se ciña de forma adecuada. El irrigador se puede doblar para acceder mejor a la prótesis de voz.
4. Apriete la pera suavemente para que el agua entre en la prótesis.
5. Incline la pera hacia arriba y deje de apretarla. La pera se volverá a inflar. Quite el irrigador de la prótesis de voz.

**Consejo:** Si usa agua, inclinar la pera hacia arriba mientras deja de apretarla permitirá que el agua regrese a la pera de succión. Evite derramar agua en las vías respiratorias, ya que puede causarle tos.

6. Para limpiar el irrigador, quite la pera del mango de inserción y limpie ambas partes con agua potable y detergente para quitar cualquier resto. Deje que se seque con el aire antes de guardarlo.
7. Desinfecte el irrigador al menos una vez al día según las instrucciones de uso.
8. Reemplace el Provox Flush al menos una vez cada 12 meses.

