



Provox® Life™ Adhesives, diseñados para una mejor fijación y mayor comodidad. Incluyen opciones adecuadas para una variedad de tipos de piel y contornos de estoma, lo que da una solución personalizada a los usuarios.




Pasos sencillos para cambiar el adhesivo de noche por el de día

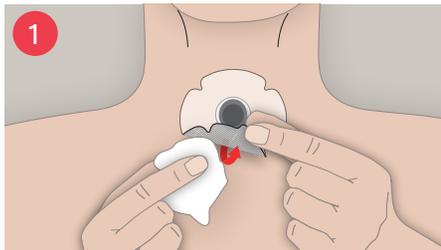

1 ▶ **QUÍTESE** el Night HME. Después, humedezca Provox Life Night Adhesive con agua y jale suavemente el adhesivo que se ha aflojado.*

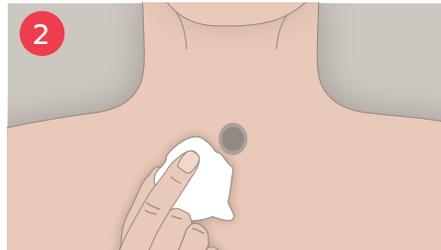


2 ▶ **LIMPIE** la piel alrededor del estoma con Provox® Cleaning Towel (toalla de limpieza) para eliminar cualquier residuo de aceite y adhesivo.

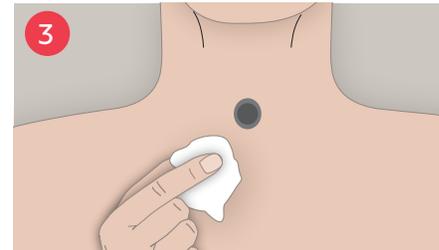


3 ▶ **PREPARE** la piel para su adhesivo de día aplicando Provox® Skin Barrier (barrera para la piel) sobre la piel limpia y seca alrededor del estoma.* Espere 1 o 2 minutos a que Skin Barrier se seque.



4 ▶ **CALIENTE** el adhesivo frotándolo entre las manos. Esto ayudará a activar el pegamento para que se adhiera mejor. Quite el papel protector de la parte de atrás del adhesivo.

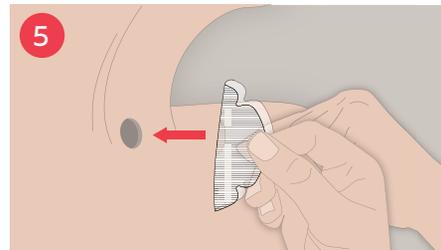

5 ▶ **APLIQUE** el adhesivo alineando el anillo inferior con el borde inferior del estoma. Coloque y masajee el adhesivo sobre la piel desde el centro hacia afuera.

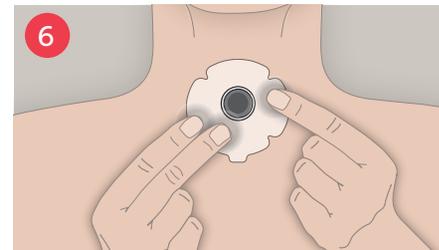

6 ▶ **MASAJÉELO** en las grietas y zonas más profundas alrededor del estoma. Fije el HME de día al acoplamiento SecureFit™, el clic garantiza que está asegurado.



Provox® Life™ Standard Adhesive



Provox® Life™ Sensitive Adhesive




Provox® Life™ Stability Adhesive


Consejo: Espere al menos 5 minutos antes de hablar con una prótesis de voz para mejorar la adhesión.

* **IMPORTANTE:** Si NO utiliza Night Adhesive a la noche, puede utilizar Provox Adhesive Remover para aflojar cualquier otro Provox Life Adhesive. Si utiliza Provox Night Adhesive de día (o en cualquier momento) NO utilice ninguna barrera cutánea, crema ni toallita con alcohol inmediatamente antes de aplicarlo.


Pasos sencillos para cambiar el adhesivo de día por el de noche

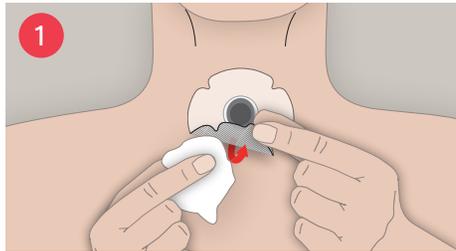

► **QUÍTESE** el adhesivo de día utilizando Provox® Adhesive Remover; empape todo el adhesivo para aflojarlo. Aplique Adhesive Remover abajo del borde del adhesivo y use la toallita para quitar suavemente el adhesivo de la piel.

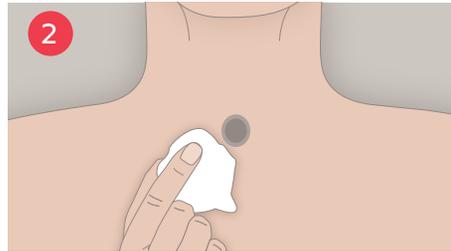


► **LIMPIE** la piel alrededor del estoma con Provox Cleaning Towel para eliminar cualquier residuo de aceite y adhesivo.

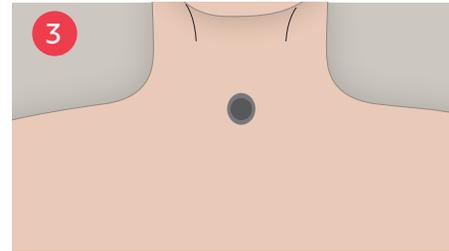


► **PREPÁRESE** la piel dejándola secar por completo. **No use Skin Barrier, toallitas, crema, alcohol ni cualquier otro preparado para la piel antes de aplicar el Night Adhesive, ya que pueden impedir que este se adhiera correctamente.**



► **CALIENTE** el adhesivo frotándolo entre las manos. Esto ayudará a activar el pegamento del adhesivo para que se adhiera mejor. Quite el papel protector del medio en la parte de atrás del adhesivo.

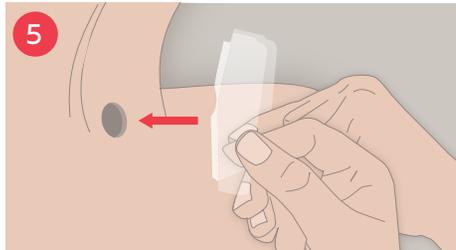

► **FIJE** primero la parte inferior, alineando el anillo interno al borde inferior del estoma.

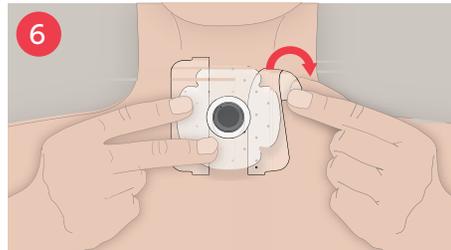

► **APLIQUE** el centro del adhesivo a la piel y masajéelo. Aplique el resto del adhesivo.



► **MASAJEÉ** todo el adhesivo en la piel. Fije suavemente el Night HME al acoplamiento SecureFit, el clic garantiza que está asegurado.



Provox® Life™ Night Adhesive

Consejo: Cuando abra el envase, controle la parte de atrás transparente para asegurarse de que el adhesivo esté por debajo de la línea de rotura. Si no es así, agite el envase para que el adhesivo se desplace hacia el fondo y rasgue la flecha.

Consejo: Evite que el Adhesive Remover o el agua entren en el estoma cuando quite el adhesivo de día.

Consejo: No jale violentamente el adhesivo, ya que puede lastimarse la piel.

Consejo: Vea los videos sobre cómo usar adhesivos en nuestro sitio web www.atosmedical.us.