

**Provox FreeHands FlexiVoice** es una válvula de fonación que funciona con un intercambiador de calor y humedad (HME) que le permite hablar con manos libres o con oclusión con los dedos.

### Introducción al uso de Provox FreeHands FlexiVoice y Provox Life FreeHands HME

- Trabaje con su médico para seleccionar la mejor fuerza de membrana.
- La fuerza mediana es la más frecuente.
- Es posible que necesite más de una fuerza de membrana según su nivel de actividad.



► **PONGA** el FreeHands FlexiVoice en el Provox Life FreeHands HME.

- Asegúrese de que **el lado abierto de la espuma mire hacia arriba.**
- El lado del HME que dice "FlexiVoice" debe estar hacia abajo.



► **PREPARE** la válvula de fonación.

- Ponga los dedos en el borde y gire el FreeHands FlexiVoice.
- Asegúrese de que el gancho SALGA del agujero.
- Ahora el FreeHands FlexiVoice está preparado para hablar con manos libres.



► **INSERTE** el FreeHands FlexiVoice con el HME conectado a su accesorio Provox Life (LaryTube Provox Life con anillo o adhesivo Provox Life).

**Consejo:** El adhesivo Provox Life Stability está diseñado específicamente para hablar con manos libres.

### NOTAS DEL MÉDICO:

Fuerza de la membrana del FreeHands FlexiVoice (encierre en un círculo una opción):

●      ●●      ●●●      ●●●●  
Ligera    Mediana    Fuerte    Extrafuerte

Accesorio para hablar con manos libres:

---



---

Instrucciones de práctica para hablar con manos libres:

---



---



---



4

► **PRACTIQUE** hablar con manos libres.

- Respire normalmente.
- Exhale y comience a hablar.
- Cuente del 1 al 10.
- Diga los días de la semana.
- Diga los meses del año.



5

El modo bloqueado mantiene la membrana abierta.

► **PRACTIQUE** bloquear la membrana.

- Ponga los dedos en el borde y gire el FreeHands FlexiVoice.
- Asegúrese de que el gancho ENTRE EN el agujero.
- El modo bloqueado le permite volver a hablar con la oclusión manual sin tener que quitar el FreeHands FlexiVoice cubriendo la abertura con el dedo.



Provox FreeHands FlexiVoice Arch

**Consejo:** Puede usar el FreeHands FlexiVoice Arch para cambiar del modo de habla al modo bloqueado. También ayuda mantener la ropa alejada de la abertura del FreeHands FlexiVoice.



6


► Después de 24 horas, **SAQUE** la válvula de fonación del HME.

**Consejo:** Presione el pulgar contra la lengüeta del HME para separarlo del FreeHands FlexiVoice. También puede usar el adminículo de extracción.



Adminículo de extracción

**IMPORTANTE:** No use su FreeHands FlexiVoice mientras duerme.

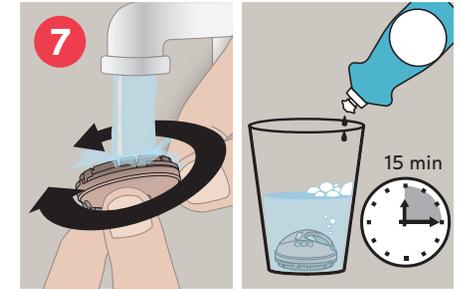


7

► **LIMPIE** y desinfecte el FreeHands FlexiVoice diariamente.

Para limpiar:

- Quite el HME del FreeHands FlexiVoice.
- Enjuague con agua tibia durante 2 minutos.
- Remoje en agua jabonosa durante 15 minutos y luego enjuague.

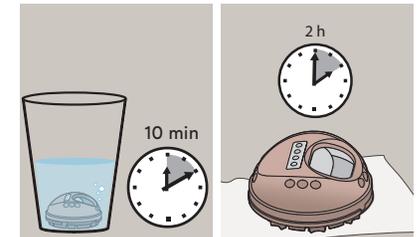

Para desinfectar:

- Quite el HME del FreeHands FlexiVoice.
- Remoje en alcohol (isopropílico o etanol al 70%) durante 10 minutos.
- Enjuague y seque durante 2 horas.
- **No hierva ni use peróxido de hidrógeno.**