


## Cuándo y cómo usar Provox® LaryTube™

Provox LaryTube es un tubo blando de silicona diseñado para evitar que el estoma se achique y puede sujetar el intercambiador de calor y humedad\* (heat and moisture exchangers, HME) Provox® o Provox® ShowerAid™. LaryTube o el adhesivo Provox® OptiDerm™ también se pueden usar como una alternativa a su adhesivo habitual cuando tenga la piel irritada o durante radioterapia, si no puede usar temporalmente un adhesivo.

### Provox LaryTube está disponible en tres estilos:

- **Estándar:** se puede usar sin orificios para los usuarios sin prótesis de voz o su médico puede perforarlo a medida con un punzón de fenestración Provox® FenestrationPunch para los usuarios con prótesis de voz. Pueden fijarse con un Provox® TubeHolder, Provox® LaryClip™ o un collar Freevent® Neckband.
- **Fenestrado:** diseñado con orificios para los usuarios con prótesis de voz para que el aire pueda pasar por el tubo hacia la prótesis. Pueden fijarse con un Provox TubeHolder, Provox LaryClip o un collar Freevent Neckband.
- **Anillo azul:** se puede usar sin orificios para los usuarios sin prótesis de voz o su médico puede perforarlo a medida con un punzón de fenestración Provox® FenestrationPunch para los usuarios con prótesis de voz. Solo se puede fijar con un adhesivo Provox®.

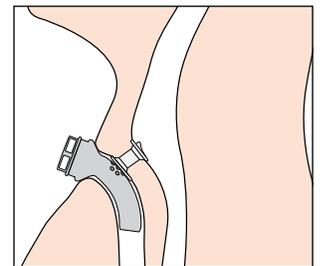

#### 1. Tamaños del Provox LaryTube

- Provox LaryTube está disponible en cuatro diámetros y tres longitudes.
- El estoma debe ser apenas un poco más grande que el Provox LaryTube.
- Es importante que el Provox LaryTube que use sea del tipo, ancho y largo correctos. El LaryTube debe caber bien en su estoma sin causar irritación. Su médico puede ayudarlo a determinar qué LaryTube es el mejor para usted.

**Consejo:** Los usuarios con prótesis de voz deben ser cautelosos cuando inserten el Provox LaryTube. Dirija el LaryTube hacia adentro y hacia abajo para evitar enganchar la prótesis de voz con el extremo del LaryTube, ya que esto podría causar que se salga de forma accidental.

**Consejo:** Comuníquese con su médico si el tubo le causa irritación o si siente que el tubo es demasiado grande o demasiado pequeño. Usted podría necesitar un tamaño diferente.

\*Provox LaryTube no es compatible con el HME Provox® Luna®. Consulte con su médico qué HME es mejor para usted.

### 2. Inserción de Provox LaryTube


- Humedezca un poco el tubo con agua o con una capa fina de lubricante soluble en agua.
- Inserte el Provox LaryTube en el estoma.
- Fije el Provox LaryTube al Provox LaryClip, a un Provox Tubeholder o a un collar Freevent Neckband. Si usa el LaryTube con anillo azul, fijelo con un adhesivo Provox.
- Inserte el HME de Provox en el sujetador de casete.



Provox LaryTube con Provox LaryClip

### 3. Extracción del HME de Provox del Provox LaryTube

- Sostenga el Provox LaryTube en su lugar con una mano.
- Con la otra mano, sostenga el HME de Provox y gírelo suavemente. Quite el HME mientras mantiene el LaryTube en su lugar.

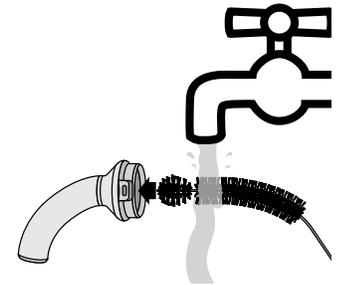

### 4. Limpieza del Provox LaryTube

- Limpie el LaryTube usando el tamaño adecuado del cepillo para cánulas Provox® TubeBrush al menos una vez al día o cuando se tape con secreciones. El cepillo Provox® Brush se puede usar para limpiar las perforaciones de un LaryTube fenestrado.
- Limpie y desinfecte el LaryTube según las instrucciones de uso.



Provox TubeBrush



Provox Brush